

2011年3月15日

患者様および介助者様各位

バクスター株式会社
透析製品事業部

東北地方太平洋沖地震に関する弊社の対応とお願い

謹啓

この度、東北地方太平洋沖地震に被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます。

弊社におきましても、地震により仙台流通センター及び東京物流センターの一部が被災・損傷を受け、腹膜透析製品の一部製品の在庫が薄くなっていますが、弊社の被災地流通センターの早期復旧、製造工場の緊急追加製造及び被災地外流通センターの出荷支援に、全力を挙げて取り組んでおります。

つきましては、当面の間、被災地の患者様が腹膜透析の治療継続を優先できるよう、格別のご配慮をいただきますようお願い申し上げます。

電力供給力不足の恐れに伴い、東京電力、東北電力のサービスエリアにおいて、計画停電の実施が通知されております。

計画停電地域のお住まいの患者様におかれましては、ご使用頂いております透析用医療機器等に関して、下記の注意をお願い致します。

弊社製品のなご一層のご愛顧を賜りますよう、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

- ゆめ/ゆめプラス

計画停電の実施時間をご確認頂き、ゆめ/ゆめプラスの動作及び治療がこの停電時間に架かる際、主治医にご相談頂きますようお願い致します。動作中に計画停電が始まり、電源の供給が止まった場合、治療が中断します。

- くり～んフラッシュ

くり～んフラッシュには非常用バッテリーが内蔵されております。ご使用されない時も常に電源コードはコンセントに接続し、機器が常に充電される状態を維持して下さい。尚、使用される際は可能な限り計画停電の時間を避けて頂きますようお願い致します。

- CAPD バッグ加温器及びぽかおん

計画停電中は、加温が停止しバックの温度が低下します。バッグをご使用される際は、バッグが加温される時間を見越してご準備頂くようお願い致します。

万が一治療が中断された場合は、主治医にご連絡いただきますようお願い致します。なお、機器に関する問い合わせは弊社 CAPD コールセンター(フリーコール 0120-506-440)にご連絡ください。

以上